

先生各位

## 検査内容変更のご案内

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

この度、下記に掲げる検査項目におきまして、検査内容を変更させていただきたくご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記


■実施日 2023年 9月 4日（月）ご依頼分より

■変更項目および変更内容

案内書	項目コード 統一コード	検査項目	変更箇所	新	現	備考
63	2436 6B610	淋菌核酸同定	採取量(mL)	ぬぐい液 (咽頭材料含む)	頸管ぬぐい液	改良試薬 に変更のため
	2435 5E021	クラミジア・トラコマチス核酸同定	必要量(mL)			


※試薬変更に伴い、『咽頭検体』も検査可能となります。

【咽頭スワブ検体の採取方法】

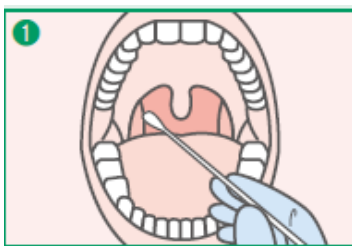


### 検体の採取

付属されているドライスワブを使用し、後咽頭部および扁桃腺、口蓋垂を擦過します。スワブを引き抜く際は口腔内に触れないように注意してください。

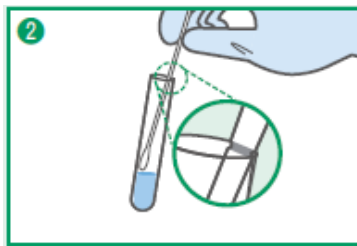

### 検体の保存

コバスPCRメディアのキャップを開けます。採取したスワブの先端が、溶液に漬からないように注意しながら入れ、柄に付けられた黒い線を容器の縁に合わせます。

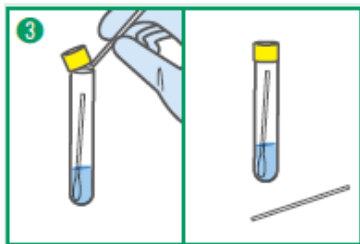

コバスPCRメディアの容器の縁を利用して、スワブの柄に付けられた線の部分でスワブの柄を折ります。キャップをしっかりと閉めます。

【注意】手元に残った折れた柄は廃棄してください。スワブの柄を折る際は絶対にはさみを使用しないでください。

子宮頸管・咽頭スワブ検体用  
コバスPCRスワブ検体採取セットⅢ

ドライスワブ

用途:  
咽頭スワブ検体採取  
子宮頸管の粘液除去

フロックスワブ

用途:  
子宮頸管検体採取



コバス  
PCRメディア

資料提供: ロシュダイアグノスティクス

ご不明な点等ございましたら貴院担当もしくは弊社お客様窓口までお申し付け下さい。